

Mueller Cold-Hot Pack 9 x 14 cm

[Retour à la page d'accueil](#)

Art: 111300 | Marque: [MUELLER](#)

Cover image

image not found or type unknown

Informations sur le produit

Compresse réutilisable, convient à la fois pour une application chaude et froide, remplie de gel.

- Garder au surgélateur pour une thérapie à froid.
- Chauffer au four à micro-ondes ou dans l'eau chaude pour une thérapie à chaud.
- Gel non-visible.

Attention : mettez toujours une housse ou une serviette entre la peau et la compresse. CONTRE-INDICATIONS CHALEUR

- maladies cardiovasculaires - troubles circulatoires - infections avec fièvre - inflammations et lésions localisées - rhumatismes avec symptômes inflammatoires - tumeurs non traitées - hyperthyroïdie - diabète sucré.

CONTRE-INDICATIONS FROID

- maladies cardiovasculaires - hypersensibilité au froid - syndrome de Raynaud - les troubles circulatoires artériels - le diabète mellitus.

ATTENTION en cas d'orthostase ou d'hypotension orthostatique.